

Aspecton[®] Nasenspray

Schnupfenspray mit Meersalzlösung zum Einsprühen in die Nase

Liebe Patientin, lieber Patient,

bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zusammensetzung:

Hypertone Meersalzlösung (entspr. 1,5 % Kochsalz-Lösung), Hypromellose, Dexpanthenol, Campher, Levomenthol, Thymianöl, Eukalyptusöl, Minzöl, Macroglycerolhydroxystearat (Ph. Eur.), Natriumhydroxid, Citronensäure-Monohydrat, gereinigtes Wasser

Ohne Konservierungsmittel, ohne Treibgas

Darreichungsform und Inhalt:

Aspecton[®] Nasenspray mit Meersalzlösung zum Einsprühen in die Nase ist in Packungen mit 20 ml erhältlich.

Anwendungsgebiete:

Zur unterstützenden Behandlung bei Schnupfen und verstopfter Nase.

Nasenspray als begleitende Maßnahme bei Schnupfen und/oder verstopfter Nase.

Gegenanzeigen:

Aspecton[®] Nasenspray darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe sowie bei Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen (z. B. Asthma bronchiale).

Aspecton[®] Nasenspray soll auch nicht nach einer Nasenoperation oder nach Unfällen im Nasenbereich angewendet werden.

Anwendung bei Kindern:

Aspecton[®] Nasenspray soll nicht bei Kindern unter 8 Jahren angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Es liegen keine Untersuchungen zur Anwendung von Aspecton[®] Nasenspray in Schwangerschaft und Stillzeit vor, daher nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Bisher keine bekannt.

Nebenwirkungen:


Überempfindlichkeitsreaktionen und Verstärkung von Bronchospasmen sind nicht auszuschließen.

Hinweis:

Wenn Sie an sich Befindlichkeitsstörungen während der Behandlung feststellen, wenden Sie sich an einen Arzt oder Apotheker.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

1. Schutzkappe vom Sprühkopf abziehen.
2. Vor der ersten Anwendung mehrmals pumpen, bis ein gleichmäßiger Sprühnebel austritt.
Bei allen weiteren Anwendungen ist das Dosierspray sofort gebrauchsfertig.
3. Führen Sie die Sprühöffnung vorsichtig in ein Nasenloch ein und sprühen Sie 1- bis 2-mal.
Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Nasenloch.

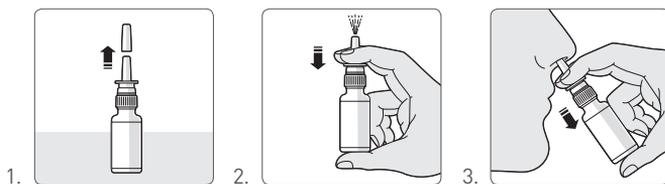

Aus hygienischen Gründen empfiehlt es sich, nach jeder Anwendung den Sprühkopf trocken abzuwischen und die Schutzkappe wieder aufzusetzen.

Dosierung für Erwachsene und Kinder ab 8 Jahre:

Je nach Bedarf mehrmals täglich 1 – 2 Sprühstöße Aspecton® Nasenspray in jedes Nasenloch sprühen. Aspecton® Nasenspray kann als begleitende Maßnahme bei Schnupfen und/oder verstopfter Nase über einen Zeitraum von bis zu 14 Tagen angewendet werden. Wenn innerhalb von 7 – 14 Tagen keine Besserung der Beschwerden eintritt, sollte der Arzt befragt werden.

Bei stärkeren Beschwerden, die eine zeitlich begrenzte Anwendung eines lokal abschwellenden Mittels erfordern, wird empfohlen, nach Beendigung der Behandlung mit dem abschwellenden Schnupfenspray die Behandlung mit Aspecton® Nasenspray noch einige Tage bis zum Abklingen der Beschwerden weiterzuführen.

Bei gleichzeitiger Behandlung mit einem abschwellenden Schnupfenspray sollte Aspecton® Nasenspray vorher angewendet werden.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit:

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der äußeren Umhüllung und auf dem Behältnis aufgedruckt. Das Medizinprodukt soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Nach Anbruch ist Aspecton® Nasenspray 6 Monate haltbar.

Hinweise zur Aufbewahrung:

Aspecton® Nasenspray für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Nicht über 25 °C lagern.

Hersteller :

KrewelMeuselbach[™]

Krewel Meuselbach GmbH, Krewelstraße 2, 53783 Eitorf
Telefon: 02243 / 87-0, Telefax: 02243 / 87-175
E-Mail: info@krewelmeuselbach.de

Apothekenexklusiv

Stand der Information

November 2018



Allgemeine Verbraucherinformation:

Aspecton® Nasenspray bringt Erleichterung bei Schnupfen und verstopfter Nase.

Vor allem in der Schnupfenzeit sind wir regelmäßig einer großen Anzahl von Schnupfenviren ausgesetzt, ohne uns dagegen wehren zu können. Bei Schnupfen schwillt die Nasenschleimhaut an und sondert einen zähen, dickflüssigen Schleim ab. Die Nase verstopft. Auch Pollen- oder Staubbelastung der Atemluft kann zu einer Verstopfung der Nase führen. Wir können nicht mehr frei durchatmen. Insbesondere in dieser Zeit ist eine gute Pflege der empfindlichen Nasenschleimhaut besonders wichtig.

Die in Aspecton® Nasenspray enthaltene Meersalzlösung reinigt und befeuchtet die verstopfte Nase und verringert schonend die Schwellung der Nasenschleimhaut für eine verbesserte Nasenatmung.

Das Produkt enthält ätherische Öle zur Aromatisierung.

Aspecton® Nasenspray ist frei von Konservierungsmitteln und frei von Treibgas.