


FUXIBIO™


FILTERING HALFMASK FILTRIERENDE HALBMASKE

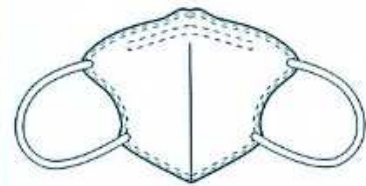

Model No. / Modelnummer:
CARE0961K

FFP2 NR
For Kids / Für Kinder

How to wear / Hinweise zum Tragen der Maske

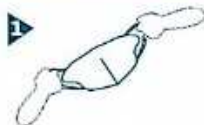

1
open the mask
Öffnen Sie die Maske



2
Hang both sides of the mask to you ear
*Hängen Sie beide seitlichen
Ohrenschlaufen über Ihre Ohren*



3
Fix the nose bridge to the nose to prevent air from entering
*Fixieren Sie den Nasenclip auf der Spitze Ihre Nase
um die Maske an die Nase anzupassen um so zu
verhindern das Luft eindringen kann*

Instructions / Anleitung

Instructions to remove and discard the mask / Anleitung zum Abnehmen und Entsorgen der Maske

1. To remove the mask, use thumbs and index fingers to remove both ear loops. / *Um die Maske abzunehmen benutzen Sie Daumen und Zeigefinger um beide Ohrschlaufen abzunehmen.*
2. Carefully dispose the used mask adequately / *Bitte entsorgen Sie die gebrauchte Maske sorgsam und angemessen.*
3. Wash or disinfect hands / *Waschen Sie oder desinfizieren Sie Ihre Hände*

Precautions / Vorsichtsmaßnahmen

1. Prior to use please check the fit of protective mask. / *Überprüfen Sie den korrekten Sitz der Schutzmaske vor der Nutzung*
2. It is unlikely that the requirements for leakage will be achieved if facial hair passes under the face. / *Wenn sich Gesichtshaar unter der Maske befindet ist es unwahrscheinlich, dass die Anforderungen für die Dichtung erreicht werden.*
3. This product does not supply oxygen. Use only in adequately ventilated areas containing sufficient oxygen to support life. / *Dieses Produkt liefert keinen Sauerstoff. Nutzen Sie es ausschliesslich in beflühteten Umgebungen die genügend Sauerstoff zur Lebenserhaltung aufweisen*
4. Do not use when the concentrations of contaminants is immediatley dangerous to health or life. Do not use this product in an explosive atmosphere. / *Nicht benutzen wenn die Konzentration von Luftverunreinigung so hoch ist, dass sie unmittelbar gefährlich für Gesundheit und Leben ist. Benutzen Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung mit explosiven Stoffen*
5. Never alter or modify this mask in any way / *Keinesfalls die Maske in irgendeiner Weise ändern oder modifizieren*
6. "NR" means Non-reusable. This mask shall not be used for more than one shift, no maintenance is necessary. Discard mask after use or if damaged in any way. / *"NR" bedeutet Non-reusable also nicht wiederverwendbar. Diese Maske darf nicht länger als für eine Schicht verwendet werden, es ist keine Wartung nötig. Entsorgen Sie die Maske auf jeden Fall nach der Nutzung oder wenn sie beschädigt ist.*
7. Children under three years old are not recommended to use the product because of their low vital capacity. / *Kinder unter 3 Jahren sollten diesen Produkt aufgrund Ihrer geringen Vital Kapazität nicht nutzen.*
8. The mask must be stored and transported in their original package and protected by the storage temperature between -20°C to +40°C, and relative humidity <80%, no corrosive gas, good ventilation / *Die Maske muss in Ihrem Originalverpackung gelagert und transportiert werden. Die Lagerung muss bei -20°C bis +40°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit <80% ohne ätzende Gase bei guter Belüftung erfolgen.*

Storage und Transportation conditions / Lager- und Transportbedingungen

Keep masks in the package away from direct sunlight or contaminants until use. Ambient temperature between -20°C to +40°C, and relative Humidity <80%, no corrosive gas. Good ventilation
During Transportation, keep away from moisture, Light and heat / *Bewahren Sie die Maske bis zur Nutzung geschützt vor direktem Sonnenlicht und Verschmutzungen in der original Verpackung auf. Umgebungstemperatur muss zwischen -20°C bis +40°C betragen die Masken müssen bei einer relativen Luftfeuchtigkeit <80% ohne ätzende Gase bei guter Belüftung gelagert/transportiert werden.*
Während dem Tranport fern von Feuchtigkeit. Licht und Hitze halten.



CE 1463

EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR

1PC/1STCK

Careable Biotechnology Co.,Ltd

FUXIBIO™

Model No. / Modelnummer:
CARE0961K

FILTERING HALFMASK
FILTRIERENDE
HALBMASKE

50
pcs

50
Stck



CLASS / SCHUTZKLASSE: **FFP2 NR**

CE 1463 EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR

CAREABLE
BIOTECHNOLOGY Co., Ltd

Instructions / Anleitung

Instructions to remove and discard the mask / Anleitung zum Abnehmen und Entsorgen der Maske

1. To remove the mask, use thumbs and index fingers to remove both ear loops. / Um die Maske abzunehmen benutzen Sie Daumen und Zeigefinger um beide Ohrschlaufen abzunehmen.
2. Carefully dispose the used mask adequately / Bitte entsorgen Sie die gebrauchte Maske sorgsam und angemessen.
3. Wash or disinfect hands / Waschen Sie oder desinfizieren Sie Ihre Hände.

Precautions / Vorsichtsmaßnahmen




1. Prior to use please check the fit of protective mask. / Überprüfen Sie den korrekten Sitz der Schutzmaske vor der Nutzung.
2. It is unlikely that the requirements for leakage will be achieved if facial hair passes under the face. / Wenn sich Gesichtshaar unter der Maske befindet ist es unwahrscheinlich, dass die Anforderungen für die Dichtung erreicht werden.
3. This product does not supply oxygen. Use only in adequately ventilated areas containing sufficient oxygen to support life. / Dieses Produkt liefert keinen Sauerstoff. Nutzen Sie es ausschliesslich in belüfteten Umgebungen die genügend Sauerstoff zur Lebenserhaltung aufweisen.
4. Do not use when the concentrations of contaminants is immediately dangerous to health or life. Do not use this product in an explosive atmosphere. / Nicht benutzen wenn die Konzentration von Luftverunreinigung so hoch ist, dass sie unmittelbar gefährlich für Gesundheit und Leben ist. Benutzen Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung mit explosiven Stoffen
5. Never alter or modify this mask in any way / Keinesfalls die Maske in irgendeiner Weise ändern oder modifizieren
6. "NR" means Non-reusable. This mask shall not be used for more than one shift, no maintenance is necessary. Discard mask after use or if damaged in any way. / "NR" bedeutet Non-reusable also nicht wiederverwendbar. Diese Maske darf nicht länger als für eine Schicht verwendet werden, es ist keine Wartung nötig. Entsorgen Sie die Maske auf jeden Fall nach der Nutzung oder wenn sie beschädigt ist.
7. Children under three years old are not recommended to use the product because of their low vital capacity. / Kinder unter 3 Jahren sollten dieses Produkt aufgrund ihrer geringen Vital Kapazität nicht nutzen.
8. The mask must be stored and transported in their original package and protected by the storage temperature between -20°C to +40°C, and relative humidity <80%, no corrosive gas, good ventilation / Die Maske muss in Ihrem Originalverpackung gelagert und transportiert werden. Die Lagerung muss bei -20°C bis +40°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit <80% ohne ätzende Gase bei guter Belüftung erfolgen.

Storage and Transportation conditions / Lager- und Transportbedingungen

Keep masks in the package away from direct sunlight or contaminants until use. Ambient temperature between -20°C to +40°C, and relative Humidity <80%, no corrosive gas. Good ventilation
During Transportation, keep away from moisture. Light and heat / Bewahren Sie die Maske bis zur Nutzung geschützt vor direktem Sonnenlicht und Verschmutzungen in der original Verpackung auf.
Umgebungstemperatur muss zwischen -20°C bis +40°C betragen, die Masken müssen bei einer relativen Luftfeuchtigkeit <80% ohne ätzende Gase bei guter Belüftung gelagert/transportiert werden.
Während dem Transport fern von Feuchtigkeit, Licht und Hitze halten.

How to wear / Hinweise zum Tragen der Maske

1. open the mask / Öffnen Sie die Maske
2. Hang both sides of the mask to you ear / Hängen Sie beide seitlichen Ohrschlaufen über Ihre Ohren
3. Fix the nose bridge to the nose to prevent air from entering / Fixieren Sie den Nasenclip auf der Seite Ihre Nase um die Maske an die Nase anzupassen um so zu verhindern das Luft eindringen kann

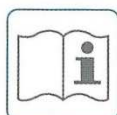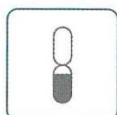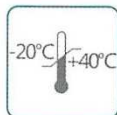

How to wear / Hinweise zum Tragen der Maske



open the mask
Öffnen Sie die Maske



Hang both sides of the mask to you ear
Hängen Sie beide seitlichen Ohrenschnäulen über Ihre Ohren



Fix the nose bridge to the nose to prevent air from entering
Fixieren Sie den Nasenclip auf der Spitze Ihre Nase um die Maske an die Nase anzupassen um so zu verhindern das Luft eindringen kann

Attention / Hinweise zur Beachtung

- Use only once, destroy after use
Nur einmal verwenden und nach der Nutzung zerstören
- Don't use package if broken
Nicht verwenden wenn die Verpackung beschädigt ist
- Please use within the validity period
Innerhalb des Haltbarkeitszeitraums verwenden

[Name] Filtering half mask / [Name] Filtrierende Halbmaske

[Model] CARE0961K / [Modell] CARE0961K

[Class] FFP2 NR / [Schutzklasse] FFP2 NR

[Applicable standard] EN149:2001+A1:2009 / [Anzuwendender Standard] EN149:2001+A1:2009

[Specification] 120 (±5) x 105 (±5)mm / [Spezifikation] 120 (±5) x 105 (±5)mm

[Structure and composition] This product consists of PP non-woven fabric, PP melt-blown fabric, nose clip earloop / [Struktur und Zusammensetzung]: Dieses Produkt besteht aus PP Vlies, PP Schmelzgeblasenes, Nasenclip und Ohrenschnäulen
Please read the instruction troughly before use / Bitte lesen Sie die Anleitung komplett durch bevor Sie das Produkten benutzen.

[Intended use] Then protective mask is intended to be worn to protect personnel from transfer of particulate material. This is a single use, non sterile product / [Vorgesehene Verwendung] Die Maske soll verwendet werden um Personen vor der Übertragung von Partikeln zu schützen. Sie ist zur einmaligen Verwendung und nicht steril.

[Warn tip] Children under three years olde are not recommended to use this product because of their low vital capacity / [Warnhinweis] Kinder unter 3 Jahren sollten dieses Produkt aufgrund Ihrer geringen Vital Kapazität nicht nutzen.

EU Declaration of Conformity / EU Konformitätserklärung: <https://www.careablemask.com/certificate.html>

Package: 50 pcs/box / Inhalt der Verpackung: 50 Stück

Shelf Life: 2 Year / Haltbarkeitszeitraum: 2 Year

Production date / Produktionsdatum: 2021.01.21

LOT No. / Produktionschargennummer: Fx21019

Manufacturer / Hersteller: Careable Biotechnology Co., Ltd
Add. / Adresse: O, 3rd Hongxin Road, Jiangmen City, Guangdong, China
/No.167, Gangkou Road, Jiangmen City Guangdong, China

Importer/Importeur: vivaLS GmbH, Nordstr. 27 33181 Bad Wünnenberg, Germany

MADE IN CHINA
HERGESTELLT IN CHINA



产品合格证 / PRODUCT CERTIFICATE

产品名称/ Product name	防护口罩 (非医用) FILTERING HALF MASK (NON-MEDICAL)		
型号/Model No.	CARE0961K	检验员./QC	
类别/Class	FFP2 NR		
规格/Size	120x105(±5)MM		
数量/Quantity	50片/50PCS	生产批次/Lot No.	FX21019
执行标准/Executive standard: EN149:2001+A1:2009		Made In China	
生产日期/Production date: 2021.01.21	有效期/Shelf life: 2年/2 years		
产品成份/Material: 49%无纺布, 32%熔喷布, 19%热风棉 49% PP non-woven, 32% PP meltblown fabric, 19% ES filter airlaid non-woven fabric			

伏羲生物科技(广东)有限公司/CareAble Biotechnology Co., Ltd.
中国广东省江门市宏兴路3号O幢(自编002) / Building O, 3rd
Hongxin Road, Jiangmen City, Guangdong, China